







EMPFOHLENE ZEITEN FÜR DAS KÜHLEN

MEDIKAMENTEN-THERAPIE	EMPFOHLENE MINIMALE VORKÜHLZEIT (MIN)	+	INFUSIONSZEIT	+	EMPFOHLENE MINIMALE NACHKÜHLZEIT (MIN)
ALLE MEDIKAMENTE	30 	+	INFUSIONSZEIT DER MEDIKAMENTE	+	90 
	+15 MIN FÜR PATIENTEN MIT DICHEM ODER AFRO-KARIBISCHEM HAAR				
WÖCHENTLICH PACLITAXEL (TAXOL)	30 	+	INFUSIONSZEIT DER MEDIKAMENTE	+	60 
	+15 MIN FÜR PATIENTEN MIT DICHEM ODER AFRO-KARIBISCHEM HAAR				
DOCETAXEL (TAXOTERE)	30 	+	INFUSIONSZEIT DER MEDIKAMENTE	+	20 
	+15 MIN FÜR PATIENTEN MIT DICHEM ODER AFRO-KARIBISCHEM HAAR				

Die empfohlenen Nachkühlzeiten beruhen auf der maximalen Plasmakonzentration, der Halbwertszeit der Medikamente, möglichen Wechselwirkungen, jüngsten Untersuchungen und der aktuellen Erfahrung von Nutzern des Paxman Kopfhaut-Kühlsystems.

Nachkühlzeiten sollten nach der Infusion des Haarausfall verursachenden Medikaments berechnet werden.

Es wird empfohlen, das Haar der Patienten vor der Kühlung mit Wasser zu befeuchten und eine Haarspülung aufzutragen, um den Kontakt mit der Kopfhaut zu verbessern und die Isolationswirkung des Haares zu mindern. Auffällige Leberwerte können gegebenenfalls eine Verlängerung der Kühlzeit erforderlich machen.



Sollte nach dem ersten Zyklus deutlicher Haarverlust auftreten, kann die Nachkühlzeit um 30 Minuten bis eine Stunde verlängert werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Paxman Coolers Ltd. Huddersfield, HD8 0LE,
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0)1484 349444. Fax: +44 (0)1484 346456.

www.paxmanscalpcooling.com
info@paxmanscalpcooling.com



[paxmanscalpcooling](https://www.facebook.com/paxmanscalpcooling)



[@scalpcooling](https://twitter.com/scalpcooling)

PAXMAN[®]
PIONEERS IN SCALP COOLING